

Hladni analgetski flaster, hidrogelni

Uživajte u olakšanju i dugotrajnoj udobnosti uz naše hladne hidrogelne flastere! Kombinacija mentola i hidrogela pruža učinkovito hlađenje koje ublažava bolove u leđima, zglobovima i mišićima. Pomaže smanjiti ukočenost i napetost mišića i tetiva. Zahvaljujući mekoj netkanoj tkanini i nježnom ljepilu, flaster se lako primjenjuje, dobro prianja uz kožu i osigurava maksimalnu učinkovitost. Udoban materijal omogućuje diskretno i ugodno nošenje tijekom cijelog dana.

Način uporabe:

Očistite i osušite zahvaćeno područje, zatim zalijepite flaster na odabrano mjesto. Ostavite da djeluje do 8 sati.

Uvijek koristite samo jedan flaster, najviše dva dnevno, najdulje 7 dana zaredom.

Ponovna primjena na istom mjestu preporučuje se nakon stanke od 7–14 dana.

Djeca mlađa od 12 godina smiju koristiti flaster samo pod izravnim nadzorom odrasle osobe.

Trudnice i dojilje smiju koristiti flaster samo nakon savjetovanja s liječnikom.

Prekinite uporabu i obratite se liječniku ako:

- se pojave kožne reakcije poput osipa, svrbeža, crvenila, iritacije, boli, otekline ili mjehurića,
- se stanje pogorša ili simptomi traju dulje od 7 dana,
- simptomi nestanu, a zatim se ponovno pojave nakon nekoliko dana.

Nemojte koristiti:

- na oštećenoj koži,
- zajedno s grijaćim jastučićima,
- u dodiru sa sluznicama, osobito s očima,
- u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koji sastojak.

Sastav: Pročišćena voda, Glicerol, Mentol, Natrijev hijaluronat, Glukozamin hondroitin, netkana tkanina, ljepljiva tvar.

Samo za vanjsku uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Medicinski proizvod.

Skladištenje: Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, mrazu ni prekomjernoj vlazi. Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 25 °C.

Veličina flastera: 7 × 10 cm **Sadržaj pakiranja:** 2 flastera

Proizvođač: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, provincija Henan, Kina

Europski zastupnik: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Njemačka

Distributer za Češku: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Češka, e-pošta: fgroup@fgroup.cz

Distributer za Slovačku: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slovačka, e-pošta: fazzini@fazzini.sk

Web: www.fortepatch.com

Certificirano CE. Medicinski proizvod.