

Hladni flaster za ublažavanje glavobolje i snižavanje temperature

Imate temperaturu ili vas boli glava? Predstavljamo vam flaster koji učinkovito pomaže ublažiti glavobolju i snižavati temperaturu kod djece i odraslih. Zahvaljujući inovativnom hidrogel sastavu i učinku hlađenja, pruža ugodan i dugotrajan osjećaj osvježanja bez potrebe za hlađenjem u hladnjaku. Donosi trenutno olakšanje, nježan je prema koži i jednostavan za upotrebu. Koristite ga kod glavobolje, povišene tjelesne temperature, umora ili pregrijavanja organizma. Flaster nije namijenjen liječenju bolesti, već privremenom ublažavanju tegoba. Može se koristiti i za rashlađivanje u toplim danima ili nakon tjelesne aktivnosti. Bez mirisa i bez lijekova. Uvijek ga imajte pri ruci!

Način uporabe: Očistite i osušite zahvaćeno područje. Uklonite zaštitnu foliju i zalijepite flaster na čelo ili stražnji dio vrata. Izbjegavajte područje s kosom. Na zahvaćeno mjesto stavite uvijek 1 flaster, najviše 2 dnevno, tijekom najviše 7 dana.

Djeca mlađa od 12 godina smiju koristiti flaster samo pod neposrednim nadzorom odrasle osobe. Trudnice i dojilje smiju koristiti flaster samo nakon savjetovanja s liječnikom.

Prestanite koristiti flaster i obratite se liječniku ako:

- se pojave kožne reakcije kao što su osip, svrbež, crvenilo, iritacija, bol, otekline ili mjehurići,
- se stanje pogorša ili simptomi traju dulje od 7 dana,
- simptomi nestanu, a zatim se ponovno pojave nakon nekoliko dana.

Upozorenja:

- Ne koristiti na oštećenoj koži.
- Ne koristiti zajedno s grijaćom podlogom.
- Izbjegavajte kontakt sa sluznicama, osobito s očima.
- Ne koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koji sastojak.

Sastav: Mentha, Glicerol, Pročišćena voda, CMC emulzija, netkana tkanina, ljepljiva tvar.

Samo za vanjsku uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Medicinski proizvod.

Skladištenje: Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, mrazu ili pretjeranoj vlazi. Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 25 °C.

Dimenzije: 5 × 12 cm **Sadržaj pakiranja:** 1 flaster

Proizvođač: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, provincija Henan, Kina

Europski zastupnik: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Njemačka

Distributer za Češku: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Češka, e-pošta: fggroup@fggroup.cz

Distributer za Slovačku: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slovačka, e-pošta: fazzini@fazzini.sk

Web: www.fortepatch.com

Certificirano CE. Medicinski proizvod.