

Flaster za ublažavanje menstrualnih bolova – Biljni sastav za učinkovito olakšanje

Flasteri su razvijeni kako bi zahvaljujući kombinaciji biljnih ekstrakata učinkovito ublažili bolove i grčeve tijekom menstrualnog ciklusa. Pružaju dubinsku toplinsku terapiju do 8 sati. Udoban dizajn osigurava opuštanje i osjećaj ugodе tijekom cijelog dana.

Način uporabe:

Očistite i osušite kožu na mjestu primjene.

Uklonite zaštitnu foliju i zalijepite flaster na željeno mjesto.

Ostavite da djeluje do 8 sati.

Na isto mjesto primijenite najviše jedan flaster dnevno, najduže 7 dana zaredom.

Djeca mlađa od 12 godina smiju koristiti flaster samo pod nadzorom odrasle osobe.

Trudnice i dojilje smiju koristiti flaster samo nakon savjetovanja s liječnikom.

Prekinite uporabu i obratite se liječniku ako:

- se pojave kožne reakcije (osip, svrbež, crvenilo, iritacija, bol, otekline ili mjehurići),
- se stanje pogorša ili simptomi traju dulje od 7 dana,
- simptomi nestanu, a zatim se ponovno pojave nakon nekoliko dana.

Nemojte koristiti:

- na oštećenoj koži,
- zajedno s grijaćim jastučićima,
- u dodiru sa sluznicama, osobito s očima,
- u slučaju poznate preosjetljivosti na bilo koji sastojak.

Sastav: Paeonia Suffruticosa, Leonuri Herba, Chuanxiong Rhizoma, Angelicae Sinensis Radix, Angelicae Dahuricae Radix, Zingiberis Rhizoma, Carthami Flos, željezni prah, aktivni ugljen, anorganska sol, netkana tkanina, ljepilo.

Samo za vanjsku uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Medicinski proizvod.

Skladištenje: Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, mrazu ni prekomjernoj vlazi. Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 25 °C.

Veličina flastera: 10 × 8 cm **Sadržaj pakiranja:** 2 flastera

Proizvođač: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, provincija Henan, Kina

Europski zastupnik: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Njemačka

Distributer za Češku: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Češka Republika, e-pošta: fgroup@fgroup.cz

Distributer za Slovačku: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slovačka, e-pošta: fazzini@fazzini.sk

Web: www.fortepatch.com

Certificirano CE. Medicinski proizvod.